

Инструкция по эксплуатации анализатора Mindray BC-2800Vet

Гематологический анализатор BC-2800Vet является технологичным и сложным лабораторным оборудованием, которое требует правильной эксплуатации и обслуживания. Рекомендуется при покупке анализатора оформлять услугу ввода анализатора в эксплуатацию. После приобретения анализатора перед началом работы обязательно ознакомьтесь с руководством оператора, которое приложено к каждому анализатору.

Ежедневно

- Для обеспечения стабильной работы анализатора и точных результатов анализа обязательно выполняйте процедуры **«Отключение»** или **«Очистка очистителем E-Z»** с использованием реагента V-28 E-Z после непрерывной работы анализатора в течение 24 часов (*см. пп. 6.10 и 10.3.7 руководства оператора*).

Еженедельно

- Если анализатор используется круглосуточно, выполняйте процедуру **«Очистка очистителем зонда»** с использованием реагента V-28P один раз в три дня. Если анализатор ежедневно выключают с использованием специальной процедуры выключения, необходимо выполнять данную процедуру еженедельно (*см. п. 10.3.6 руководства оператора*).

По мере необходимости

- При подозрении на загрязнение камеры выполняйте процедуру **«Очистка камеры»** (*см. п. 10.3.9 руководства оператора*).

Когда количество обработанных проб достигает 100, появляется напоминание о необходимости выполнить процедуру **«Очистка очистителем зонда»** с использованием реагента V-28P и **«Очистка очистителем E-Z»** с использованием реагента V-28 E-Z (*см. пп. 10.3.6 и 10.3.7 руководства оператора*).

Когда суммарное число обработанных проб достигает 4 000, появляется напоминание о необходимости выполнить процедуру **«Очистка блока промывки»** с использованием реагента V-28P (*см. п. 10.3.12 руководства оператора*).

Если анализатор не планируется использовать в течение двух недель или более, выполните процедуру **«Подготовка к транспортировке»**, чтобы опорожнить и промыть линии для жидкостей, а затем протрите анализатор насухо и упакуйте его для хранения (*см. п. 10.3.13 руководства оператора*).

Для поддержания анализатора BC-2800Vet в хорошем рабочем состоянии рекомендуется раз в год проводить профилактические работы в авторизованном сервисном центре.

Скачать руководство оператора в электронном виде можно на нашем сайте по ссылке: https://medupdate.ru/files/catalog/o_3740.pdf

ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется при возникновении неисправностей анализатора, связанных с нарушением правил эксплуатации и обслуживания.